



Bosch met splitter

Installatiehandleiding persoonsalarm





Installatiehandleiding persoonsalarm

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.


Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u tijdens kantooruren naar CSI. Onze kantoor tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten, zodat u direct contact kunt opnemen met onze Customer Care Center indien nodig.

Stap 1

Voordat u begint met installeren, controleer of het pakket de volgende onderdelen bevat:

- 1 Alarmapparaat
- 2 Handzender
- 3 Voedingsadapter
- 4 Telefoon snoer
- 5 Splitter
- 6 Telefoonstekker

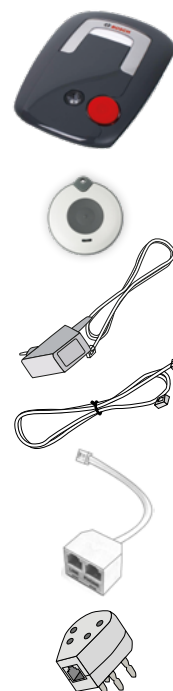

Handleiding

Aansluiten Bosch persoonsalarm met splitter

Stap 2

U heeft een Bosch splitter ontvangen zodat u uw persoonsalarm aan kunt sluiten op een telefoonmodem in plaats van uw voormalige analoge telefoonaansluiting.



Stap 3


De bestaande installatie zal gewijzigd moeten worden. In de huidige situatie zit uw persoonsalarm op uw analoge telefoon aansluiting in de muur zoals hier langs aangegeven. Haal nuzowel uw telefoonstekker van uw telefoon als de telefoonstekker van het persoonsalarm uit de telefoonaansluiting.



Stap 4


Nu gaan we de ontvangen splitter aansluiten op uw persoonsalarm. Hiervoor dient u het telefoonsnoer uit het persoonsalarm te halen. Dit doet u door het lipje van de connector in te drukken en dan het telefoonsnoer uit het apparaat te halen.

Plaats de stekker van de splitter in de deze aansluiting. Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel om te voorkomen dat het snoer wordt belast als hieraan wordt getrokken.

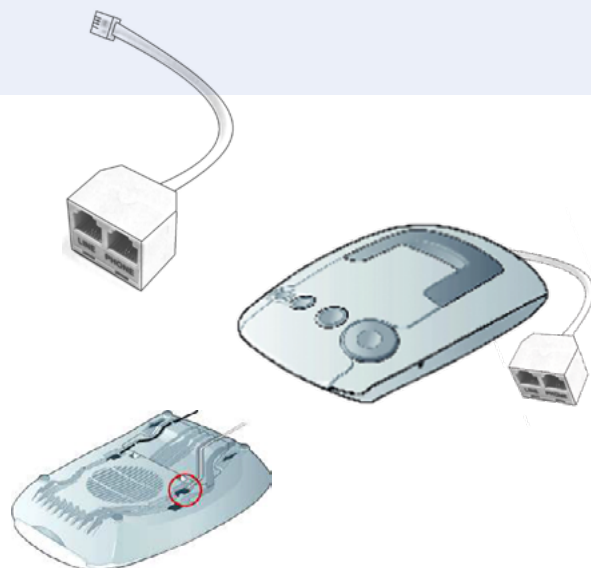


Stap 5

Plaats het telefoonsnoer dat u eerder uit het persoonsalarm hebt gehaald in de "Line" aansluiting van de splitter.

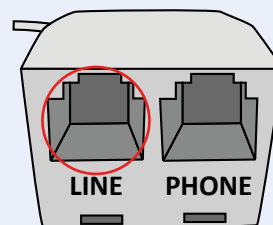

Stap 6

Haal nu de andere zijde van het telefoonsnoer uit de telefoonstekker. De telefoonstekker heeft u niet meer nodig.

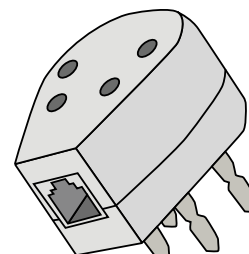


Stap 7

Sluit nu het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting van uw modem. Dit is de "PHONE 1" of "TEL 1" uitgang (nooit "PHONE 2" of "TEL 2" gebruiken!).




Stap 8

Sluit nu uw telefoon aan op de splitter. U stopt deze in de overgebleven "PHONE" aansluiting.

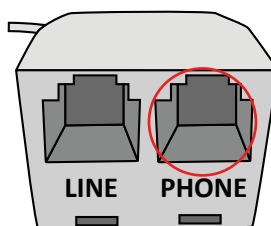

De nieuwe situatie

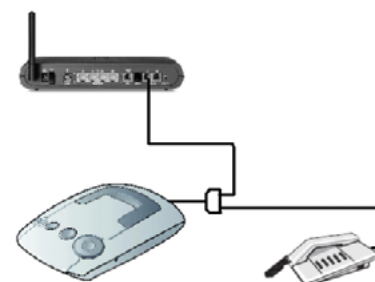

Gefeliciteerd!

Het apparaat is goed aangeloten. Wij wensen u veel plezier ermee. CSI, een veilig gevoel.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op www.csipersoonsalarmering.nl of bel ons 040 - 258 01 55. U kunt mailen naar service@csicervice.nl. Wij helpen graag verder.

CSI Persoonsalarmering

Biesven 2
5595 DD Leende
T: 040 - 258 01 55
E: service@csicervice.nl

